


Hurtigguide til Export i DICOM format - modtageren/patienten skal anvende en DICOM-viewer

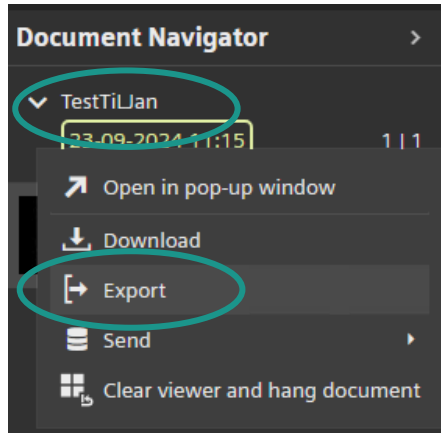

1


Højreklik på Study Description i Document Navigator

>
Vælg Export



2

Vælg ISO
>
Vælg Export

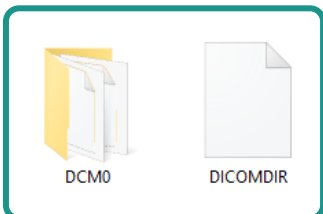

3

Der gemmes 2 filer lokalt, som *begge* skal eksporteres til USB eller brændes.
Vil man åbne billeder i en viewer, skal filen DICOMDIR vælges.

Skal billederne anonymiseres, vælges Minimized.
Man kan skrive sin egen tekst i felterne.

Original	Minimized
Original	Minimized
Patient ID	Patient ID
0104909995	AnymPat.3.139.1931282
Last Name	Last Name
Mosebryggensen	YHMBX
First Name	First Name
Sverre Test	DMNRLUN
Birth Name	Birth Name
	YHMBX
Sex	Sex
Male	Male
Date of Birth	Date of Birth
01-04-1990	24-03-1990
	Random