

Vejledning til billedviewer

I denne vejledning finder du en guide til hvordan du finder studier på en patient i KirCACS og navigerer videre til Siemens Carbon viewer.

Nederst i dette dokument vil du også finde svar på nogle af de spørgsmål du måtte have i forbindelse med at finde studier til din klinik.

Step 1:

For at se studier/billeder på en patient i den nye viewer, skal du være sikker på at du har en patient i fokus i journalen. Indtast navn eller CPR-nummer på den patient, du ønsker at finde studier/billeder på i søgebaren øverst.

The screenshot shows the patient search interface in KirCACS. The search bar at the top contains the text "010490-9995 Sverre Test Mosebryggelsen". Below the search bar, patient details are displayed, including "Speciale 53", "Medlem af Danmark ???", and "Online booking sms". The interface also shows navigation tabs for "Journal overblik", "Forrige aftale", "Næste aftale", and "Billeddiagnostik".

Step 2:

Den næste betingelse som skal opfyldes er, at der skal være patientsamtykke til 'Rekvirering af billeddiagnostik'. Uden patientsamtykke vil der ikke være adgang til studierne. Du finder patientsamtykke under 'Samtykke' i patientens stamdata.

The screenshot shows the patient consent form in KirCACS. The form is titled "Patient stamdata" and contains fields for CPR number, gender, age, first name, and last name. Below the form, there are tabs for "Generel", "Relationer", "Læge", "Samtykke", "Notifikationer", "Portal", and "Indfaldsvinkel". The "Samtykke" tab is selected, showing a list of consent items with checkboxes. The items are: "Journalførelse og opbevaring", "Kontakt til din læge", "Rekvirering af billeddiagnostik", "Tværfaglig behandlingsforløb", and "Sundhedsforsikring eller anden betaler". The "Rekvirering af billeddiagnostik" item is checked.

Step 3

Når de to betingelser er opfyldt, altså at der er en patient i fokus, som har afgivet patientsamtykke til rekvirering af billeddiagnostik, så kan du komme videre til oversigten over tilgængelige studier for patienten. Det gør du ved at klikke på 'Billeddiagnostik'. Her vil systemet vise alle de studier, der er tilgængelige for patienten.

The screenshot shows a patient's profile page. At the top, there are tabs for 'Patient stamdata', 'Kliniske stamdata', 'Patienter', and 'Tid til næste patient'. Below these are fields for patient ID (010490-9995), name (Sverre Test), and age (34 år). There are also fields for 'Speciale 53', 'Medlem af Danmark ???', and 'Online booking sms'. A section for 'Nyeste samtykke (24-09-2024)' shows 'Danmark'. The main navigation bar includes 'Billeddiagnostik', 'Forrige aftale:', 'Næste aftale:', 'Vis 10', 'Journalnotater', 'Dokumenter', 'Billeddiagnostik' (highlighted with a red box), and 'Exorlive'. Below this is a filter for 'Studier' set to 'Hele KirPACS (CPR baseret)' with date filters from '24-09-2019' to '24-09-2024'. A table lists available studies:

Optagelses dato	CPR	Patientnavn	Beskrivelse	Modalitet	Organisation	Kropsdel	Projektion	Dosis	Serier	Billeder
23-09-2024	010490-9995	Mosebryggelsen^	TestTILJan Sverre Test	DX	NIKKB Demo - Agla	CSPINE	AP		1	1

Step 4

I listen over tilgængelige studier finder du det studie, som du ønsker at åbne i billedvieweren. For at åbne det trykker du på det blå CPR-nummer.

This screenshot is identical to the one above, but the blue link for the CPR number '010490-9995' in the table is highlighted with a red box, indicating it should be clicked to open the image viewer.

Studiet vil nu være åbnet i billedvieweren.

Vi har samlet svar på nogle af de spørgsmål du kan have i forbindelse med navigering til den nye billedviewer herunder:

Q&A angående den nye billedviewer

Vi kan ikke se Billeddiagnostik fanebladet.

Har I et KirPACS abonnement? Kontakt eventuelt Billeddiagnostik afdeling på e-mail billeddiagnostik@kiroviden.sdu.dk

Vi har taget et studie i klinikken, men kan ikke se det i listen.

Vælg *Egen klinik* i stedet for *Hele KirPACS*. Hvis studiet er fejlmarkeret (rødt) er CPR eller navn på patienten forkert. Ret CPR vha. blyantikonet.

Optagelses dato	CPR	Patientnavn	Beskrivelse	Modalitet
24-09-2024	301071		Spine	DX

Når du klikker på blyantikonet, vil nedenstående editor åbne. Her kan du rette CPR, og systemet vil automatisk opdatere både CPR og navn.

Studie

Fortryd Gem

CPR

Beskrivelse

Vi har sendt et studie ind på en forkert patient eller der er noget galt med studiet.

Vælg *Egen klinik* i stedet for *Hele KirPACS*. Tryk på blyanten og skriv *Skal slettes* i beskrivelse. Studiet slettes herefter automatisk.

Vi har taget et studie uden korrekt CPR og/eller navn idet patienten er fra udlandet eller det drejer sig om et emergency studie.

Vælg *Egen klinik* i stedet for *Hele KirPACS*. Tryk på blyanten og tilføj ordet *emergency* til studiebeskrivelse